



## **KOMBAJN KOSMETYCZNY VB 24 FUNKCJE + MASKA LED**

32800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- Bezpłatne, profesjonalne szkolenie (włącznie z opieką telefoniczną po szkoleniu),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,
- Wieloletnie doświadczenie,

## CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

- Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,
- Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,
- Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,
- Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,
- Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,
- Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,
- Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,
- Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

## OFERTA DOTYCZY KOMBAJNU KOSMETYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W FUNKCJE:

- Peeling kawitacyjny,
- Sonoforeza,
- Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski ,
- Ultradźwięki,
- Galwan,
- Jonoforeza,
- Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
- Mezoterapia bezigłowa trychologiczna
- Fale radiowe bipolarne na twarz,
- Fale radiowe bipolarne na ciało,
- Laser w głowicach fal radiowych,
- Mikrodermabrazja diamentowa,
- Oxybrazja – peeling wodno-tlenowy,
- Mezoterapia wodno tlenowa,
- Mezoterapia mikroigłowa,
- Makijaż permanentny,
- Laser biostymulujący,
- Podciśnieniowy lifting z TENS,

- Liposukcja ultradźwiękowa,
- Głowica infrared,
- Dermomasaż,
- Wejście na butlę z tlenem,
- Analizer skóry.

#### OPIS FUNKCJI:

-Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już keratocyty.

#### Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

#### Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,

- Revital 20+,
- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,
- Lifting 45+,
- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

#### Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie.

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

#### Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

#### -MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia.

W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Działanie:

- Rozjaśnianie przebarwień skóry,
- Spłycenie blizn,
- Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- Oczyszczanie cery,
- Likwidacja zmarszczek.

#### -OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNO-TLENOWA:

Oksybrazja, Hydrabrazja, Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz powietrza. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.

Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem. Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej.

Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

#### -MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY:

Nowoczesny system makijażu permanentnego + mezoterapii mikroigłowej z laserem biostymulacyjnym. Gwarantuje precyzyjną i stabilną pracę z dokładną regulacją wysunięcia igły. Dzięki temu nie ma obawy, że barwnik wprowadzony zostanie za głęboko i pozostawi nierówny makijaż. Umożliwia wykonanie konturu wraz z cieniowaniem.

Zastosowanie innowacyjnego materiału odpornego na ścieranie i czynniki zewnętrzne TECAPEEC gwarantuje bardzo długą i niezawodną pracę urządzenia.

Aparat wzbogacony jest o LASER BIOSTYMULUJĄCY przyspieszający gojenie skóry.

Zalety Urządzenia:

- Elektronicznie stabilizowana prędkość nakłuć,
- Precyzyjna regulacja pracy,
- Cyfrowy panel sterujący,
- Laser biostymulujący,
- Ergonomiczny kształt rączki.

#### - PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS:

Urządzenie to łączy dwie metody oddziaływania na skórę by zwiększyć i wzmocnić efekt liftingu. Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędrnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów). Metoda TENS, jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na świecie. W jej wykorzystaniu przodują: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael, Rosja. Prowadzi się tam najwięcej badań nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburzeń funkcji mięśni i nerwów.

#### Działanie:

- Pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyspieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- Zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- Lepsze odżywianie tkanek,
- Szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- Działanie przeciwbólowe,
- Regulowanie napięcia.

Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami. Masaż ten często nazywany jest lipomasażem. Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.

#### -LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED:

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbite komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają

przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion.

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej nadźwiękowieniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikaniu fali ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:

- Niwelacja tkanki tłuszczowej,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie partii ciała.

-DERMOMASAŻER:

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- Zmniejszenie cellulitu,
- Ujędrnienie ciała,
- Wspomaganie drenażu limfatycznego,
- Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- Spłycenie blizn,
- Niwelacja rozstępów,
- Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

-ANALIZER SKÓRY:

-MASKA LED:

## CHROMOTERAPIA ŚWIATŁEM LED

Light-emitting diode, czyli w skrócie LED, to dioda, która emituje światło o różnej długości fali. Diody stykają się ze skórą, dzięki czemu wiązka światła dociera do wnętrza komórki stymulując zachodzące wewnątrz procesy. Skuteczność naświetlania światłem LED można porównać do działania lasera, jednak fototerapia LED jest absolutnie nieinwazyjna i nie narusza struktury komórek jedynie stymuluje i w naturalny sposób aktywuje zachodzące w niej procesy regeneracyjne.

MASKA LED wykorzystuje trzy długości fali dając szerokie spektrum działania w zabiegach na twarz i szyję.

## KOLOR CZERWONY

Czerwone światło przyspiesza metabolizm komórek, pobudza krążenie krwi, poprawia koloryt skóry, zwiększa jej elastyczność, dotlenia ją i wygładza zmarszczki.

## KOLOR NIEBIESKI

Niebieskie światło hamuje rozwój stanów zapalnych. Trądzik jest zazwyczaj spowodowany infekcją bakteryjną, niebieskie światło jest w stanie niszczyć bakterie nie naruszając tkanek skóry, a przez to zminimalizować trądzik, i leczyć go w okresie zapalnym w stosunkowo krótkim czasie.

## KOLOR FIOLETOWY

Jest to połączenie światła czerwonego i niebieskiego, łączy w sobie skuteczność terapii świetlnej, szczególnie użytecznej w przypadku leczenia trądziku i łagodzenia blizn będących jego pozostałością.

## TLENOTERAPIA

Specjalnie zaprojektowany kształt wewnętrzny maski oraz kaniula łącząca z urządzeniem infuzyjnym powoduje, że tlen zostaje rozprowadzany na całej powierzchni twarzy. Tlen powoduje natychmiastowe dotlenienie głębokich warstw skóry, znacząco pobudza procesy przemiany materii oraz wzmacnia procesy regeneracyjne. Podczas zabiegu następuje dotlenienie komórek twarzy. Medyczny tlen jest wdychany podczas zabiegu działając pozytywnie na cały organizm.

## TERAPIA PRĄDEM GALWANICZNYM

POLDERMA CHROMO-MASK posiada 7 specjalnie zaprojektowanych elektrod emitujących delikatny prąd galwaniczny, który ma na celu zwiększenie wchłaniania substancji czynnych, poprzez przekrwienie, przyspieszenie procesów przemiany materii,



zwiększenie tonusu mięśni mimicznych oraz przyspieszenie regeneracji tkanki nerwowej.

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADŹWIĘKI, SONOFOREZA, ŚWIATŁOTERAPIA  
LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN, JONOFOREZA,  
ELEKTROSTYMULACJA PRĄDEM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Częstotliwość peelingu kawitacyjnego	25KHz
	Łopatką do pracy ciągłej
Światłoterapia	kolor czerwony
Światłoterapia	kolor niebieski
Prąd galwaniczny	+/- 6mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz
Max. moc głowic UD	1W/cm2

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY I CIAŁA, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA  
TRYCHOLOGICZNA

Zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Napięcie wejściowe	220 – 230V
Moc wyjściowa	0,04 W/cm <sup>2</sup> – 0,28 W/cm <sup>2</sup>
Zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% – 100%

FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GŁOWICACH FAL RADIOWYCH

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	120W

Częstotliwość	1MHz
Intensywność	5-100W

#### MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Czas pracy	0-30 min
Moc	60 W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

#### OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNO-TLENOWA

Moc	500Wat,
Ciśnienie pompy	(max 12bar) na wyjściu 10 bar-możliwość pełnej regulacji,
	Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w 0 50gr.

#### MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA, MAKIJAŻ PERMANENTNY

Czas pracy	praca ciągła
Częstotliwość	60b/s-170b/s
Napięcie	230V
Moc	20W
Laser	650nm
Moc lasera	3mW

#### PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Częstotliwość	120 Hz
Natężenie prądu TENS	0 - 6.4 mA
Podciśnienie	0 – 0,8 bar

#### LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED


Moc	35W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

#### DERMOMASAŻER

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60W
Podciśnienie	5-20 inHg

#### MASKA LED

ilość diod	niebieski - 161 diod LED, czerwony - 165 diod LED
maksymalne ciśnienie tlenu podczas pracy	2 Bar
maksymalna moc jednej diody	50mW
pobór mocy	20W
napięcie	220-230V
częstotliwość	50-60Hz
żywoćność diod	100000 godzin

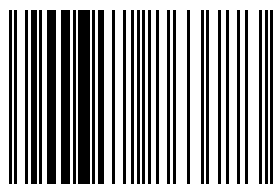

5904358863773